



## MASQUE RÉUTILISABLE - MPA100 Kids® "MASQUE DE PROTECTION 100% AJUSTABLE"

### Conseils de stockage & d'entretien

Nous recommandons de stocker ce dispositif dans son emballage d'origine, à température ambiante, à l'abri de l'humidité, d'une exposition directe à la lumière et loin d'une source de chaleur.

### Entretien des éléments textiles :

- lavage machine, cycle normal à 60° ;
- pas de chlorage ;
- séchage en tambour autorisé, température modérée 60 °C ;
- repassage avec une température maximale de semelle de fer de 120 °C ;
- pas de nettoyage à sec.

Veillez à ce que les performances ne soient pas altérées avant toute remise en place du dispositif.

### Recommandations



- Durée d'utilisation : 4h.
- Lavez-vous les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique avant de mettre le masque, après l'avoir retiré ou à chaque fois que vous touchez le masque usagé.
- Assurez-vous que le masque a été lavé préalablement à sa réutilisation.
- Le masque est correctement mis en place quand il couvre le nez et la bouche.
- Lors du port du masque, évitez de le toucher.
- Lavez le masque immédiatement après l'avoir retiré ou isolez-le dans un sac avant de le laver.
- Lorsqu'il s'humidifie, utilisez un autre masque.

### Composition

43 % polyamide, 29 % mousse polyuréthane, 22% polyester, 6% elasthanne.

Absence de latex, de phtalates, de nickel et de produit d'origine animale ou biologique.

**Matériau dont les performances ont été mesurées après 10 lavages par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, (rapport RP/20-3956/DGA MNRBC/2000305/NP).**

Efficacité de filtration des particules 3µm : 95 %.

Efficacité de filtration des particules 1µm : 94 %.

Respirabilité : essai de perméabilité à l'air : 535 L.m-2.s-1 (à dépression 100Pa).

**Testés 40 lavages par le PÔLE TEXTILE ALSACE (Rapport n° : 20200602-CLT0125-X3DMSPM-Test complet).**

**Testés 50 lavages en interne par le GROUPE SOBER.**

Efficacité de filtration des particules 3µm : 91 %.

MPA100 Kids® est un masque breveté, réutilisable.

Ce dispositif n'est ni un dispositif médical au sens du Règlement UE/2017/745 (masques chirurgicaux), ni un équipement de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (masques filtrants de type FFP2).

Groupe SOBER SAS - [www.sober.fr](http://www.sober.fr)

Siège Social : 391, rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest - 69830 SAINT-GEORGES-DE-RENEINS - France

Tél. : +33 (0)4 74 60 75 03 - Fax : +33 (0)4 74 60 71 06

Contact commercial : [commercial@sober.fr](mailto:commercial@sober.fr) - Contact utilisateur : [groupesoberetvous@sober.fr](mailto:groupesoberetvous@sober.fr)




# MPA100 Kids®

LE MASQUE DE PROTECTION 100% AJUSTABLE



Sangles d'oreilles  
complètement  
ajustables

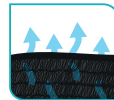

Matériau respirant,  
doux et extensible

- Masque barrière à usage du grand public
- Norme : Masque UNS 1
- Adaptable à toutes les morphologies
- Masque réutilisable
- Taille enfant (4 à 12 ans)





MPA100 Kids® est un modèle déposé.

## Mise en place


1

Positionnez les sangles d'oreilles de part et d'autre du masque à l'aide des bandes Velcro®.

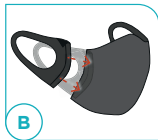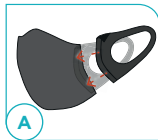

2

Placez le masque, en le tenant par la partie externe, de façon à ce qu'il recouvre le nez et le menton.

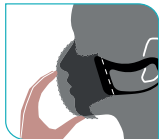


3

Placez les sangles d'oreilles autour des oreilles



4

Ajustez, si besoin, les sangles d'oreilles et la barrette nasale.

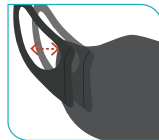

5

Pour plus de confort, découpez les ailettes en excédent.



6

Scannez le QR code pour plus d'informations sur votre masque MPA100 Kids®.

